

Matériels nécessaires :

- 1 Pompe BWT El medical (machine verte)
- 1 cathéter Unithermia réf : 404017 (1 cathéter + 1 poche pré connectée – pelable stérile)
- Cytotoxique : 40 mg d'épuribicine/mitomycine dilué dans 50cc d'eau stérile ou Nacl avec une seringue de 50cc à embout type luer-lock
- 1 seringue 50cc à embout type luer-lock pour aspirer les urines
- 1 champ percé
- 1 nuisette
- 1 champ carré de table
- 1 Désinfectant
- Gaze (3 à 5 suivant habitudes)
- Boule de coton (3 à 5 suivant habitudes)
- 1 Pince
- 1 Gel lubrifiant
- Eau stérile + seringue 20cc (gonflage du ballonnet de la sonde).

Avant la procédure :

Patient : Pour le patient ½ verre d'eau la veille au soir et ½ verre d'eau le matin si le patient en éprouve le besoin. Ni café, thé, coca-cola ou toute autres boissons diurétiques - Pre-instillation : Faire une bandelette pour connaître le pH. Le PH doit être idéalement proche de 5 car cela potentialise l'effet du cytotoxique (x 10).

Instillation :

- 1- Allumer machine avec bouton (derrière la machine)
- 2- Appuyer sur flèche du bas
- 3- Mettre cathéter avec la clé (key) sur l'emplacement de lecture de la machine et appuyer sur flèche du bas
- 4- Appuyer sur flèche du bas
- 5- Mettre la poche sur le dôme chauffant et remettre le couvercle (beige) sur le dôme
- 6- Mettre la tubulure entre les deux mâchoires de la pompe
- 7- Fermer les mâchoires de la pompe
- 8- Appuyer sur flèche du bas
- 9- Mettre le capteur de température
- 10- Appuyer sur la flèche du bas puis fermer robinet
- 11- Appuyer de nouveau sur la flèche du bas
- 12- Retirer le plastique protecteur de stérilité du cathéter
- 13- Mettre le bout du cathéter dans l'eau pour effectuer la purge
- 14- Appuyer sur ON pour purger
- 15- Une fois qu'il n'y a plus de bulle, clamber (clamp BLANC) puis appuyer sur ON
- 16- Insérer le cathéter dans l'urètre du patient, jusqu'à la vessie
- 17- Appuyer sur la flèche du bas
- 18- Gonfler le ballonnet avec 20 cc d'eau
- 19- Appuyer sur la flèche du bas
- 20- Connecter seringue luer lock de 50cc et aspirer les urines
- 21- Appuyer sur la flèche du bas
- 22- Retirer seringue (poubelle)
- 23- Connecter la seringue luer lock contenant le cytotoxique
- 24- Injecter le cytotoxique
- 25- Retirer la seringue et fermer le robinet
- 26- Déclamber le clamp BLANC
- 27- Appuyer sur ON pour démarrer le traitement

50 min plus tard ... Fin de procédure :

- 1- A la fin de la procédure, une alarme retentit
- 2- Appuyer alors sur ON – le traitement est terminé
- 3- Retirer le couvercle (beige) du dôme chauffant
- 4- Retirer la poche du dôme chauffant
- 5- Mettre la poche en déclivité (au sol) afin d'évacuer le cytotoxique par gravité (pendant 2 minutes)
- 6- Clamper le clamp BLANC,
- 7- Dégonfler le ballonnet 20 cc à l'aide d'une seringue
- 8- Retirer le capteur de température
- 9- Pratiquer l'ablation de sonde
- 10- Mettre l'ensemble du système (sonde + poche) dans le mini-collecteur

NOTA BENE : A l'ablation de la sonde, si un peu de liquide se met sur les parties génitales ou les cuisses du patient, faire un rinçage à l'eau. Inviter le patient à se doucher (savon/eau) dès le retour chez lui.

IMPORTANT : La totalité des déchets liés au traitement devront être mis dans mini-collecteurs (boîtes jaunes) pour les déchets d'activités de soins à risques infectieux conformément à la réglementation en vigueur dans votre établissement.

