

BWT Ergänzende Instruktionen – Beginnen einer Behandlung

- Start BWT Instillationen 3-4 Wochen nach TURBT
- Behandlungsprotokoll: 6 x wöchentlich, gefolgt von 10 x monatlich

1

CE 0344
Elmedical Ltd.
29 Haharash St.
Hod-Hasharon Israel
T:+972-9-7413211
F:+972-9-7413212

EC REP
MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10
48163 Muenster, Germany

2 ON

Sensor IN

3 KEY

4

Einige Tropfen NaCl hinzufügen

5

ON KEINE BLASEN

OFF

6 KATHETER EINFÜHRUNG - RICHTUNG

20ml WASSER IN

7 Urin OUT

8 Medikament IN

9

10 Soll Wert

🔥 = 45°C

🕒 = 50min

- 1 Lesen sie die Gebrauchsanleitung
- 2 Verbinden der Konsole & einstellen der Parameter
- 3 RFID Chip auslesen & Katheterset anschliessen
- 4 Tropfen NaCl hinzufügen, Sensor IN & Absperrhahn schließen
- 5 Prime Katheter Set's
- 6 Einführung des Katheters & aufblasen des Ballons
- 7 Entleerung der Blase durch ablassen des Urins
- 8 Applizierung des Medikaments in die Blase
- 9 Klemme öffnen
- 10 Aktivierung der Behandlung



BWT-Ergänzungsblatt 2 - Fehler und deren Behebung

- Start BWT Instillationen 3-4 Wochen nach TURBT
- Behandlungsprotokoll: 6 x wöchentlich, gefolgt von 10 x monatlich

Fehler: Kathetereinführung ist nicht möglich

Grund: Der Katheter nicht steif genug, um durch die Prostata-Harnröhre zu gelangen

Schritte der Korrekturen:


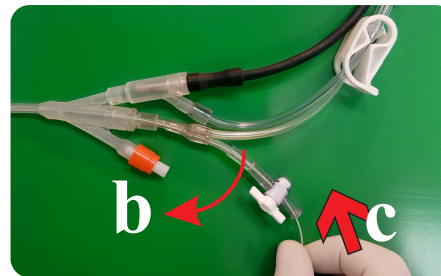
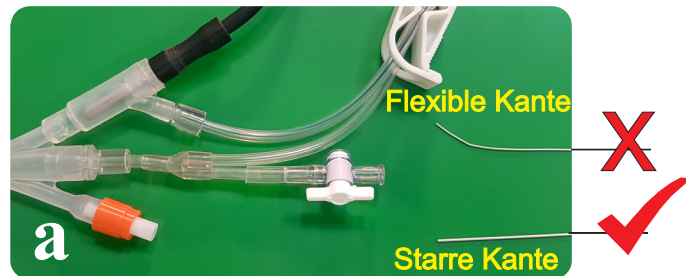


- Verwenden Sie die starre Kante des 0.9mm Führungsdrahtes
- Biegen Sie das Absperrhahnrohr
- Führen Sie die starre Kante des Führungsdrahtes durch den offenen Absperrhahn zur Katheterspitze ein
- Katheter mit dem Führungsdraht in den Patienten einführen
- Führungsdraht entfernen und Absperrhahn schliessen
- Fortfahren der Behandlung gemäss Gebrauchsanweisung


Störung: Behandlung mit Meldung abgebrochen; "Temp/FlowFault"

Grund: Patient hat Blaseninhalt verloren / Blasenwand blockiert Katheter

Schritte der Korrekturen:

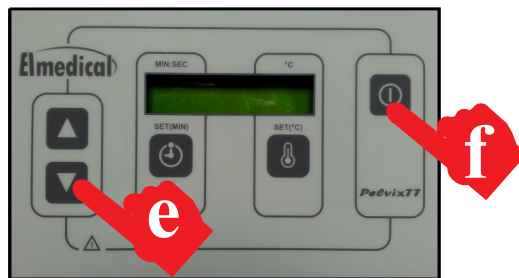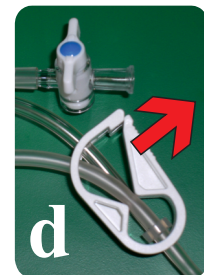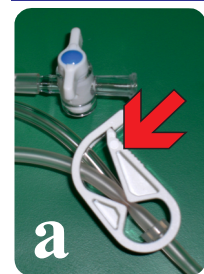

- Klemme schließen
- 20 ml Wasser in die Blase geben
- 10 ml Wasser in den Foley-Ballon geben
- Klammer öffnen
- Drücken ▼ Sie zum Akzeptieren
- ON drücken, um die Behandlung wieder zu aktivieren

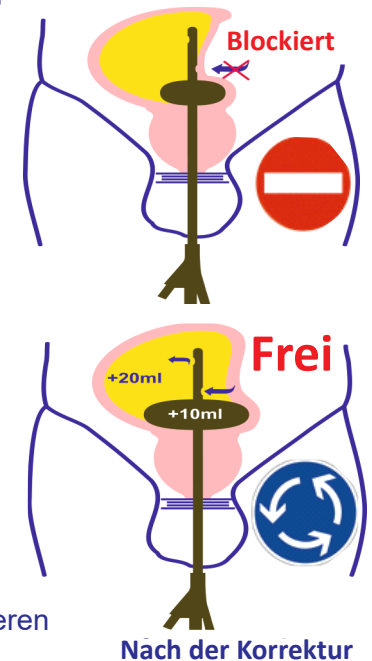

Nach der Korrektur