




Montavit

Cathejell

einfach clevere

Einhandbedienung

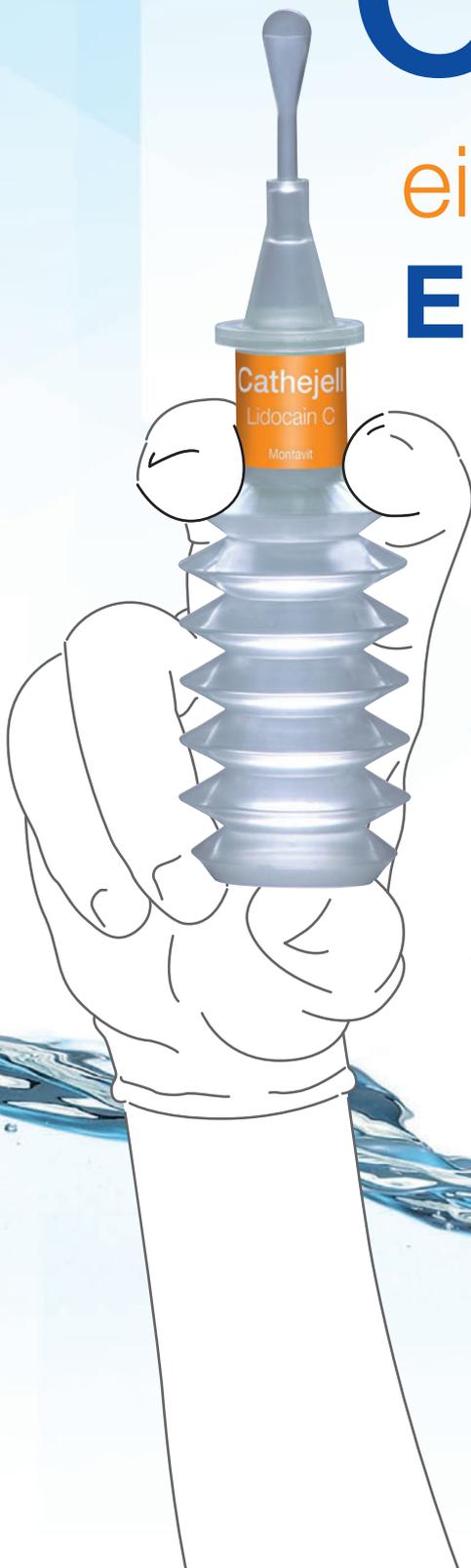

Steriles & klares Gleitmittel-Gel



Cathejell

cleveres Design



Einhändige Benutzung



Optimale Viskosität



Dampfsterilisiert bei 121 °C



**Frei von Parabenen,
Latex und PVC**



Applikator Spitze

Für gynäkologische und proktologische Eingriffe



Abbruchspitze

Einfaches Öffnen mit einer Hand



Versenkte Sollbruchstelle

Für eine reibungslose Anwendung

Ziehharmonika-Spritze

Dosierung mit niedrigem Initialdruck

Schonende Instillation und einfache Dosierung
mit einer Hand

Steriles, kristallklares und wasserlösliches
Gleitgel

Ermöglicht die Reaspiration von Gel und Urin

Cathejell

für jeden Patienten und Verfahren

Cathejell ist der Pionier unter den Gleitgelen weltweit.

Urogenitaltrakt

- » Intraurethral
- » Intravaginal

Gastrointestinaltrakt

- » Gastroskopie
- » Koloskopie
- » Rektoskopie (TRUS)

Atemwege

- » Oropharyngeal
- » Nasopharyngeal

Cathejell Mono



Einfaches Gleitgel Medizinprodukt der Klasse IIb

Cathejell Lidocain



Anästhetikum (2% Lidocain) Medizinprodukt Klasse III

Cathejell Lidocain C



Anästhetikum (2% Lidocain) & Antiseptikum (0,05% Chlorhexidin) Medizinprodukt Klasse III

Cathejell C




(nur urethral)

Antiseptikum (0,05% Chlorhexidin) Medizinprodukt Klasse III


Cathejell

benutzerfreundlich

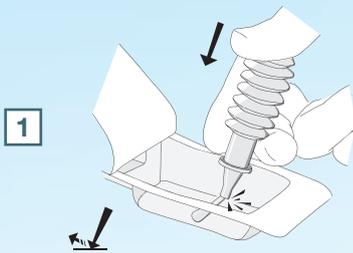


Cathejell Ziehharmonikaspritze öffnen

Brechen Sie die abbrechbare Spitze mit einem kurzen, scharfen Stoß auf das sterile Feld oder die Blisterpackung ab.

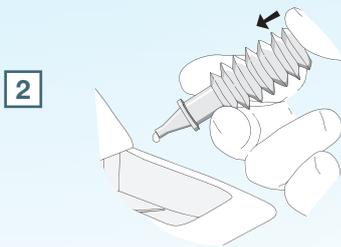


Ein Tropfen für leichteres Einführen

Einen Tropfen des Gleitgels vorsichtig herausdrücken.

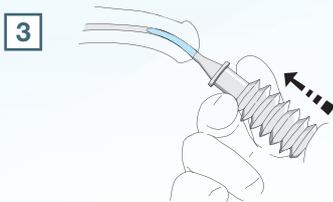


Sanfte Instillation

Träufeln Sie das Gleitgel langsam ein, indem Sie mäßigen Druck auf die Spritze ausüben.

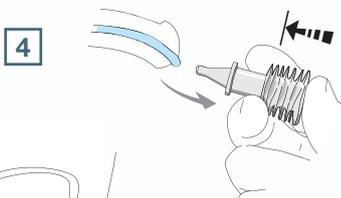

Halten sie die Spritze gedrückt

Leeren sie die Ziehharmonikaspritze vollständig und entfernen Sie sie gepresst, dann führen sie den Katheter oder das Instrument ein.

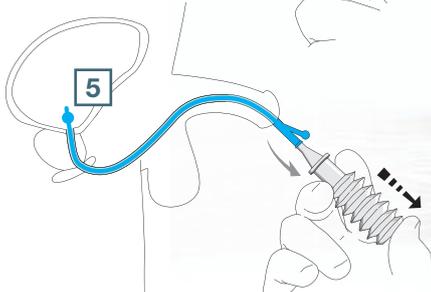

Ansaugen von Gleitgel oder Urin

Nach dem Einführen eines Katheters können Gleitgel oder Urin angesaugt werden.



Schauen sie sich das Anwendungsvideo von Cathejell an und sehen Sie, wie einfach es zu bedienen ist.

Pharmazeutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H.

Salzbergstraße 96 | 6067 Absam/Austria
Tel + 43 5223 57926 | Fax + 43 5223 57926 11
pharma@montavit.com | www.montavit.com



Montavit

601091/102021

pure
medical device

Lokal vertrieben von
PURE Medical Device SA

Kundendienst 0 848 225 225
info@pure-medical-device.com
www.pure-medical-device.com

Lamartine 27
1203 Genf
Schweiz