




Montavit

Cathejell

uso semplice e intelligente

con una sola mano

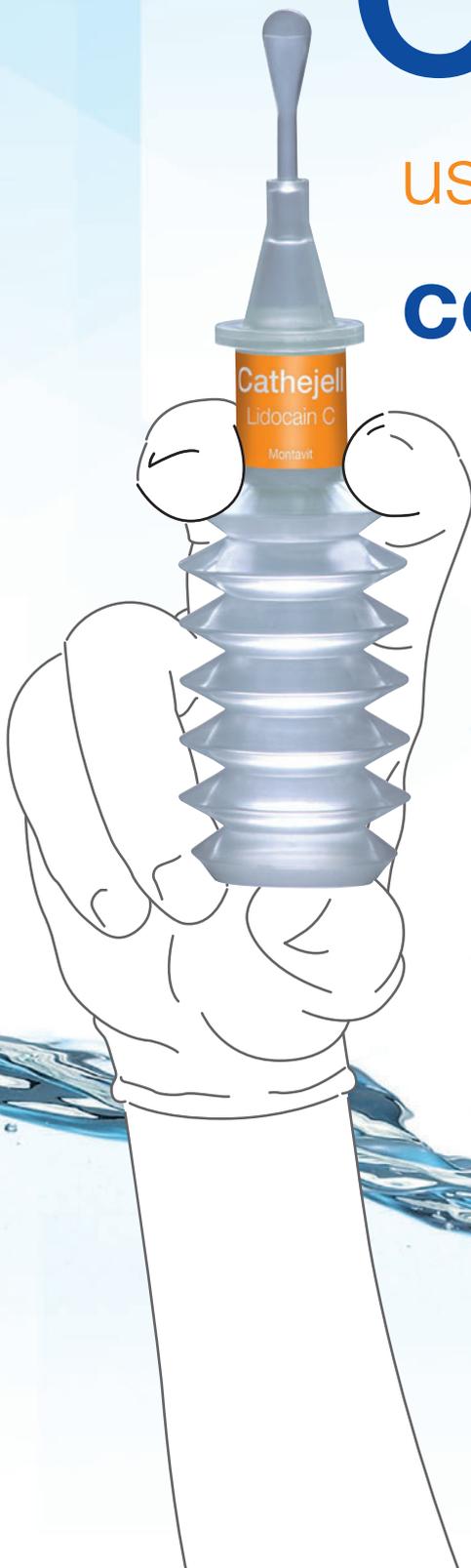

Gel lubrificante sterile e trasparente



Cathejell

design semplicemente intelligente



Uso a mano singola



Viscosità ideale



Sterilizzato a vapore a 121 °C



Senza parabeni,
lattice e PVC



Punta applicatore

Per procedure ginecologiche e proctologiche



Punta di rottura

Apertura facile con una sola mano



Punto di rottura svasata

Per una buona applicazione

Siringa a fisarmonica

Dosaggio con bassa pressione iniziale

Instillazione delicata e facile dosaggio con una sola mano

Gel lubrificante sterile, cristallino e solubile in acqua gel lubrificante

Permette la riaspirazione di gel e urina

Cathejell

per ogni paziente e procedura

Cathejell è il pioniere tra i gel lubrificanti in tutto il mondo.

Tratto Urogenitale

- » Intrauretrale
- » Intravaginale

Tratto Gastrointestinale

- » Gastrosopia
- » Colonscopia
- » Rettoscopia (TRUS)

Tratto Respiratorio

- » Orofaringeo
- » Nasofaringeo

Cathejell Mono



Gel lubrificante semplice dispositivo medico di classe IIb

Cathejell Lidocain



Anestetico (2% lidocaina) dispositivo medico di classe III

Cathejell Lidocain C



Anestetico (2% lidocaina) e antisettico (0,05% clorexidina) dispositivo medico classe III

Cathejell C




(solo uretrale)

Antisettico (clorexidina 0,05%) dispositivo medico classe III

Cathejell


facile da usare

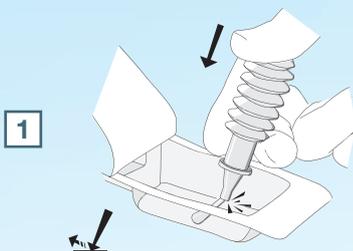

1

Aprire la siringa a fisarmonica Cathejell


Rompa la punta a scatto con una breve azione brusca sul campo sterile o sul blister.

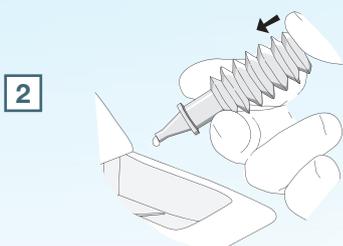

2

Una goccia per un inserimento più facile


Sprema delicatamente una goccia di gel lubrificante.

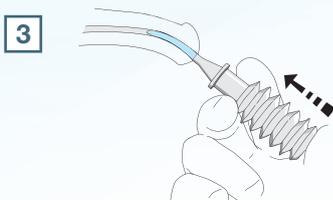

3

Instillazione soft


Instillare lentamente il gel lubrificante applicando una pressione moderata sulla siringa.

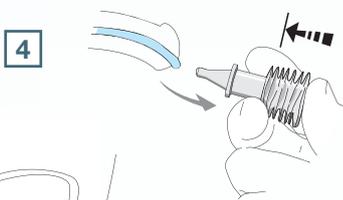

4

Tenere la siringa premuta

Svuoti completamente la siringa a fisarmonica e la rimuova premuta, poi inserisca il catetere o lo strumento.

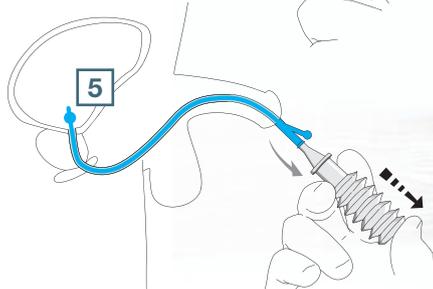

5

Riaspirazione di gel lubrificante e urina

Dopo aver inserito un catetere, il gel lubrificante o l'urina possono essere aspirati tramite aspirazione.



Guardi il video di applicazione di Cathejell e veda come è facile da usare.

Pharmazeutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H.

Salzbergstraße 96 | 6067 Absam/Austria

Tel + 43 5223 57926 | Fax + 43 5223 57926 11

pharma@montavit.com | www.montavit.com



Montavit

601091/102021

pure
medical device

Distribuito localmente da
PURE Medical Device SA

Assistenza Clienti 0 848 225 225
info@pure-medical-device.com
www.pure-medical-device.com

Lamartine 27
1203 Ginevra
Svizzera